

Ecolav Varenr. 387872 100 ml

Ecolav Varenr. 387874 500 ml



## DK – Brugsanvisning

Skyllevæske,  
steril og endotoksinfri

### Indhold

1000 ml indeholder:  
Aqua ad iniectabilia 1000 ml

### Indikationer

Til skylning og rensning under  
kirurgiske indgreb

Til skylning af sår og brandsår

Til fugtning af sårtamponader,  
klæde og forbindinger

Til skylning og rensning af blære-  
katetre

Til skylning og rensning ved  
stomabehandling

Til skylning og rensning af  
instrumenter og udstyr

Til fyldning af respirationsluftbe-  
fugtere (brug af beholder på 100  
ml eller større anbefales)

Til mekanisk skylning af øjnene  
(brug af beholder på 30 ml anbe-  
fales)

### Dosering

Mængden af væske afhænger af  
situationen.

### Overdosering

Overdosering i forbindelse med  
sårskylning og intra-operativ  
applikation kan føre til absorbe-  
ring af skyllevæsken, hvilket kan  
føre til hypervolaemia i form af  
hypoton hyperhydratation.

### Modtræk i tilfælde af overdo- sering

Afbryd skylningen. Korrektion af  
væske- og elektrolytbalancen  
afhængig af den specifikke klini-  
ske situation.

## Aqua B. Braun

### Advarsler og forsigtighedsreg- ler

Må ikke anvendes til infusion.  
Må kun anvendes såfremt  
væsken er klar, og plomberingen  
er ubrudt.

Åbne beholdere må ikke gemmes.  
Overskydende væske skal fjernes.  
Genanvendelse af engangsremedier  
medfører en potentiel risiko  
for patienten og brugeren. Det  
kan føre til kontaminering  
og/eller reduceret funktion. Kon-  
taminering af og/eller reduceret  
funktion i remediet kan medføre  
skade, sygdom eller død for pati-  
enten.

Opbevares utilgængeligt for  
børn.

Aqua B. Braun må ikke anvendes  
til intratekale skylningsprocedu-  
rer.

### Bivirkninger

Ingen kendte.

### Anvendes inden

Se beholderens etiket

### Dato for sidste revision

0310