

Ecobag Click 3000 ml Varenr. FREU930



DK – Brugsanvisning

NaCl 0,9% B. Braun

Skyllevæske,
steril og endotoksinfri

Indhold

1000 ml indeholder:	
Natriumklorid	9,00 g
Aqua ad iniectabilia	
til	1000 ml
Elektrolytter:	mmol/l
Na ⁺	154
Cl ⁻	154

Indikationer

- Til skylning og rensning under kirurgiske indgreb
- Til skylning af sår og brandsår
- Til fugtning af sårtamponader, klæde og forbindinger
- Til skylning og rensning af blærekatetre
- Til skylning og rensning ved stomabehandling
- Til skylning og rensning af instrumenter og udstyr
- Til intra- og postoperativ skylning (endoskopindgreb uden HFstrøm, efter TUR-indgreb)
- Til fyldning af respirationsluftbefugtere (brug af beholder på 100 ml eller større anbefales)
- Til mekanisk skylning af øjnene (brug af beholder på 30 ml anbefales)
- Til næseskylning (brug af beholder på 30 ml anbefales)

Dosering

Mængden af væske afhænger af situationen.

Overdosering

Overdosering i forbindelse med sårskylning og intra-operativ applikation kan føre til absorbering af skyllevæsken, hvilket kan føre til hypervolaemia i form af hypoton hyperhydratation.

Hovedpine, rastløshed og disorienteret er symptomer på hyperhydratation.

I svære tilfælde kan coma-lignende stadier forekomme.

Modtræk i tilfælde af overdosering

Afbryd skylningen. Korrektion af væske- og elektrolytbalancen afhænger af den specifikke kliniske situation.

Advarsler og forsigtighedsregler

Må ikke anvendes til infusion. Må kun anvendes såfremt væsken er klar, og plomberingen er ubrudt. Åbne beholdere må ikke gemmes. Overskydende væske skal fjernes. Genanvendelse af engangsremedier medfører en poten-

tiel risiko for patienten og brugeren. Det kan føre til kontaminering og/eller reduceret funktion. Kontaminering af og/eller reduceret funktion i remediet kan medføre skade, sygdom eller død for patienten. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er risiko for absorption af større mængder væske, som det kan være tilfældet, hvis opløsningen anvendes i store legemshuler eller på store såroverflader, må opløsningen ikke anvendes til hyperhydrerede patienter. Under sådanne forhold skal opløsningen anvendes med forsigtighed til patienter med

- Hypertonisk dehydrering,
- Hyperkaliæmi,
- Hypermatriæmi,
- Hyperkloræmi, Lidelser, hvor begrænsning af natriumindtagelse er indiceret, såsom hjerteinsufficiens, generaliseret ødem, lungeødem, hypertension, eklampsi, svær nyreinsufficiens.

NaCl 0,9% B. Braun må ikke anvendes til intratekale skylningsprocedurer.

Bivirkninger

Ingen kendte.

Anvendes inden

Se beholderens etiket

Dato for sidste revision

0310

B | BRAUN
SHARING EXPERTISE