

Skyllefrekvens for Uro-Tainer®

Oversigten er vejledende.

Ved at anvende denne oversigt følges B. Brauns anbefalinger omkring skyllefrekvensen for Uro-Tainer®.

Det anbefales, at sætte frekvensen op eller ned afh. af hvor tilfredsstillende effekten er.

Den maksimale skyllefrekvens for alle produkterne er 2 x dagligt.

Du er altid velkommen til at kontakte en af vores produktspecialister, hvis du har spørgsmål til anvendelsen af eller til skyllefrekvensen for Uro-Tainer®.

Se kontaktoplysninger på bagsiden.



1	2	3
UDFORDRING	PRODUKT	SKYLLEFREKVENNS
Kateterstop pga. inkrustationer . (hver/ hver anden uge)	➔ Uro-Tainer® Twin Suby G 3,23%	➔ 2 x ugentligt i min. 2 uger.
Kateterstop pga. inkrustationer . (sjældnere end hver/ hver anden uge)	➔ Uro-Tainer® Twin Suby G 3,23%	➔ 1 x ugentligt i min. 2 uger.
Fnuller og/eller slim. Mistanke om bakteriel kolonisering. Ved start på RENT kateter.	➔ Uro-Tainer® Polyhexanid	➔ 2 x ugentligt i min. 2 uger.
Fnuller og/eller slim. Mistanke om bakteriel kolonisering. Ved start på URENT kateter.	➔ Uro-Tainer® Polyhexanid	➔ Opstart 1 x dagligt i 5-7 dage. Herefter 2 x ugentligt i min. 2 uger.
Kombination af fnuller, og/eller slim og inkrustationer samt mistanke om bakteriel kolonisering.	➔ Uro-Tainer® Polyhexanid i kombination med Uro-Tainer® Twin Suby G 3,23%	➔ Uro-Tainer® Polyhexanid x 2 Uro-Tainer® Twin Suby G 3,23% 1 x ugentligt i min. 2 uger.
Genstridige inkrustationer og/eller smerter pga. inkrustationer.	➔ Uro-Tainer® Twin Solutio R 6%	➔ 1 x samme dag som/dagen før katerskift. Afrøves i min. 2 uger.

Hvem kan jeg kontakte vedr. Uro-Tainer®?



Sandra Niemann

Produktspecialist/Sygeplejerske
Region Sjælland & Hovedstaden
Tlf.: 51 18 49 67
Sandra.niemann@bbraun.com



Maria Olga Tastrup

Produktspecialist/Sygeplejerske
Region Nord, Midt & Syddanmark
Tlf.: 21 39 32 42
Mariaolga.tastrup@bbraun.com

