

# Ecobag Click 1000 ml Varenr. FREU812

## Ecobag Click 3000 ml Varenr. FREU912



DK – Brugsanvisning

### Aqua B. Braun

Skyllevæske,  
steril og endotoksinfri

#### Indhold

1000 ml indeholder:  
Aqua ad iniectabilia 1000 ml

#### Indikationer

Til skylning og rensning under kirurgiske indgreb  
Til skylning af sår og brandsår  
Til fugtning af sårtamponader, klæde og forbindinger  
Til skylning og rensning af blærekatetre  
Til skylning og rensning ved stomabehandling  
Til skylning og rensning af instrumenter og udstyr  
Til fyldning af respirationsluftbefugtere (brug af beholder på 100 ml eller større anbefales)  
Til mekanisk skylning af øjnene (brug af beholder på 30 ml anbefales)

#### Dosering

Mængden af væske afhænger af situationen.

#### Overdosering

Overdosering i forbindelse med sårskylning og intra-operativ applikation kan føre til absorbering af skyllevæsken, hvilket kan føre til hypervolaemia i form af hypoton hyperhydratation.

#### Modtræk i tilfælde af overdosering

Afbryd skylningen. Korrektion af væske- og elektrolytbalancen afhængig af den specifikke kliniske situation.

#### Advarsler og forsigtighedsregler

Må ikke anvendes til infusion. Må kun anvendes såfremt væsken er klar, og plomberingen er ubrudt.  
Åbne beholdere må ikke gemmes.  
Overskydende væske skal fjernes.  
Genanvendelse af engangsremedier medfører en potentiel risiko for patienten og brugeren. Det kan føre til kontaminering og/eller reduceret funktion.

Kontaminering af og/eller reduceret funktion i remediet kan medføre skade, sygdom eller død for patienten.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Aqua B. Braun må ikke anvendes til intratekale skylningsprocedurer.

#### Bivirkninger

Ingen kendte.

#### Anvendes inden

Se beholderens etiket

#### Dato for sidste revision

0310