

Flexima® 3S Lukket

2-dels system med fleksibel mekanisk kobling



- Simplicity
- Softness
- Security

Indikation

- Kolostomi

Egenskaber

- Mekanisk fleksibel kobling med styret påsætning af pose på plade
 - 'Nøglen passer til låsen'
 - Nem og præcis placering
 - Sikker påsætning i 3 positioner
- Løftbar flange på pladen
- Låseknop, der giver ekstra sikkerhed
- Hudklæber udvaskningsresistent overfor afføring
- Filter:
 - Sikkert
 - Renser luften effektivt
 - Minimerer ballon-effekt
- Bælteører på posen

Produktbeskrivelse

System

- 2-dels lukket stomipose med filter og fleksibel mekanisk kobling
- Pose
 - PVC-fri film
 - Blødt non-woven materiale
 - Med bælteører

• Findes i en beige og en transparent udgave

• Tre pose størrelser mini 220 ml, midi 502 ml og maxi 615 ml

Basisplader

- Blomsterformet, hydrokolloid klæber, der er sikker, udvaskningsresistent og fleksibel
- Findes både som flad og i en 6 mm dyb konveks udgave
- Fire ringstørrelser 45, 55, 65 og 80 mm



Et sikkert 2-dels system, der er

- ✓ fleksibelt og smidigt i brug
- ✓ let og enkelt at håndtere og hvor "nøglen passer til låsen"
- ✓ med løftbar flange – minimum af tryk på maven ved påsætning
- ✓ med en låseknop, der giver ekstra sikkerhed, og et hørbart klik, når den låses
- ✓ med mulighed for at påsætte posen i 3 forskellige positioner
- ✓ med hudvenlig blomsterformet klæber, der giver sikker hudkontakt
- ✓ med en stabil klæber, der ikke vaskes bort af afføring
- ✓ diskret i brug da koblingen er meget lav




Fleksibelt og diskret



"Nøgle og lås"

Et sikkert nyt filter, der

- ✓ er sikkert i brug
- ✓ renser luften effektivt
- ✓ minimerer risikoen for ballon effekt

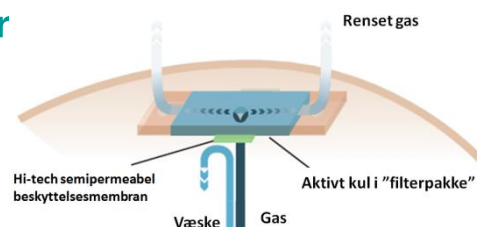


Flexima® 3S Lukket

2-dels system med mekanisk fleksibel kobling



- Simplicity
- Softness
- Security

Brugsvejledning

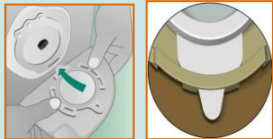

1. Få posen rigtigt sat på fra starten med styret påsætning (3 positioner)



2. Posen trykkes på pladens kobling eller også sættes fingrene ind under den løftbare flange. De to ringe trykkes derefter sammen uden, at der sker tryk på maven



3. Den mekaniske kobling sikres yderligere med en låseknop, hvorfra der kommer et hørbart klik, når den låses
4. Mulighed for at sætte bælte på posens bælteører



Et komplet sortiment af lukkede poser

Varenr. Beige pose	Varenr. Transp. pose	Produktnavn POSER	Stk./æske
931245N	-	Flexima 3S lukket, 45 mm, Mini	30 stk.
931045N	931145N	Flexima 3S lukket, 45 mm, Midi	30 stk.
931445N	931545N	Flexima 3S lukket, 45 mm, Maxi	30 stk.
931255N	-	Flexima 3S lukket, 55 mm, Mini	30 stk.
931055N	931155N	Flexima 3S lukket, 55 mm, Midi	30 stk.
931455N	931555N	Flexima 3S lukket, 55 mm, Maxi	30 stk.
931065N	931165N	Flexima 3S lukket, 65 mm, Midi	30 stk.
931465N	931565N	Flexima 3S lukket, 65 mm, Maxi	30 stk.
931480N	931580N	Flexima 3S lukket, 80 mm, Maxi	30 stk.
Varenr. basisplade	Varenr. Konvekspade	Produktnavn PLADER	Stk./æske
936415N	937415N	Flexima 3S 45/15-30 mm >C	5 stk.
936420N	937420N	Flexima 3S 45/20 mm	5 stk.
936425N	937425N	Flexima 3S 45/25 mm	5 stk.
936430N	-	Flexima 3S 45/30 mm	5 stk.
936515N	937515N	Flexima 3S 55/15-40 mm >C	5 stk.
-	937530N	Flexima 3S 55/30 mm	5 stk.
936535N	937535N	Flexima 3S 55/35 mm	5 stk.
936540N	-	Flexima 3S 55/40 mm	5 stk.
936615N	937615N	Flexima 3S 65/15-50 mm >C	5 stk.
-	937640N	Flexima 3S 65/40 mm	5 stk.
936645N	937645N	Flexima 3S 65/45 mm	5 stk.
936815N	-	Flexima 3S 80/15-65 mm >C	
Varenr.		Produkt	Stk./æske
036780A		Stomibælte	1 stk.